

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO  
CONDON PIEL® RETARDANTE**

CONDONES MASCULINOS DE CAUCHO NATURAL DE LATEX



<b>Registro Sanitario</b>	<b>INVIMA 2022DM-0025043</b>																																													
<b>Clasificación Dispositivo</b>	<b>Clase IIb</b>																																													
<b>Usos</b>	<p><b>Método anticonceptivo de barrera:</b> El uso de preservativos es altamente efectivo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. El condón Piel Retardante esta lubricado con benzocaína disuelta en silicona, lo cual permite retrasar la eyaculación masculina y por tanto aumentar el tiempo de la relación sexual.</p>																																													
<b>Especificaciones de Producto</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Prueba</th> <th style="width: 40%;">Especificación</th> <th style="width: 30%;">Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Natural</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Textura</td> <td>Rizada y punteada</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td>min. 180 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>52 ± 2 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td>Entre 400 y 700 mg</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>Concentración de Benzocaína</td> <td>5 %</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Detección de agujeros</td> <td>Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Presión de estallamiento</td> <td>min. 1,0 kPa</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Volumen de estallamiento</td> <td>min. 18 litros</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Hongos y levaduras</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesofilos</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>S. aureus</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>E. Coli</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>Pseudomonas</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Color	Natural	ISO 4074:2015	Textura	Rizada y punteada	ISO 4074:2015	Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015	Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015	Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno	Concentración de Benzocaína	5 %	ISO 4074:2015	Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015	Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015	Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015	Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	Aerobios mesofilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente	<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente	<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente
Prueba	Especificación	Norma Técnica																																												
Color	Natural	ISO 4074:2015																																												
Textura	Rizada y punteada	ISO 4074:2015																																												
Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015																																												
Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015																																												
Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno																																												
Concentración de Benzocaína	5 %	ISO 4074:2015																																												
Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015																																												
Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015																																												
Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015																																												
Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																												
Aerobios mesofilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																												
<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<b>Descripción del producto</b>	<p>Los condones PIEL® Retardante son condones masculinos de caucho natural de látex de pared estriada y punteada, lubricados con silicona y benzocaína (agente retardante), transparentes, de forma anatómica y con reservorio. ancho nominal 52 mm. Cada condón PIEL® es controlado electrónicamente y empaçado higiénicamente para cumplir con los estándares internacionales definidos en la norma ISO 4074 § 4-14 y fueron realizadas las pruebas de biocompatibilidad de acuerdo con la ISO 10993.</p>																																													

<p><b>Instrucciones de uso</b></p>	<p><b>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar Condones PIEL®</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique la fecha de vencimiento impresa en el foil y use el condón PIEL® únicamente si se encuentra vigente.</li> <li>2. Al momento de uso verifique la integridad del foil en el cual se encuentra empacado el Condón PIEL®. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado, si el foil se encuentra arrugado o si la burbuja de aire no es palpable.</li> <li>3. El foil debe abrirse con la yema de los dedos. No utilice elementos cortopunzantes (tijeras, bisturí, llaves, joyas, etc.) ni los dientes, ya que puede rasgar el látex del condón.</li> <li>4. Saque del empaque con cuidado el condón PIEL® y verifique que este esté listo para desenrollar. Absténgase de usar si el condón se percibe seco o quebradizo.</li> <li>5. Coloque el condón PIEL® sobre la cabeza del pene erecto tomándolo por el reservorio (punta). Desenrolle el condón PIEL® a lo largo del pene hasta llegar a la base del mismo. Verifique que no queden burbujas de aire entre el condón y el pene.</li> <li>6. El condón PIEL® está listo para su uso.</li> <li>7. Después de la eyaculación, retire el pene erecto de la vagina sosteniendo el condón PIEL® por el borde para evitar derrame de semen.</li> <li>8. Retire el condón PIEL® del pene y deseche en papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</li> </ol>
<p><b>Precauciones de Uso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto de uso único:</b> Use un condón PIEL® nuevo por cada contacto sexual. No lo use dos veces. Reutilizar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.</li> <li>• El uso de dos o más condones PIEL® simultáneamente no aumenta la seguridad de uso del condón y puede provocar fricciones que dañan el látex.</li> <li>• Si la persona que esté usando el preservativo nota que este se desprende o que le presiona de forma excesiva, debe entonces interrumpir de inmediato la penetración por riesgo de rotura del preservativo.</li> <li>• En caso de usar lubricantes íntimos, se debe garantizar que sea compatible con el látex del condón PIEL®</li> <li>• Las sustancias de aplicación tópica diferentes a lubricantes íntimos (medicamentos, lociones, cremas, jabones, vaselina, aceite de bebe, loción corporal, aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc.) puede afectar la integridad del condón PIEL®, por lo cual no se recomienda su uso simultaneo.</li> <li>• En caso de sospechar o detectar una falla, acuda a una IPS en las 72 horas posteriores a la relación sexual. Allí se le brindara atención médica a usted y su pareja.</li> <li>• En caso de estar recibiendo algún tipo de tratamiento de aplicación directa en el pene o en la vagina, ya sea con o sin receta médica, se recomienda consultar con su médico o farmacéutico.</li> <li>• El látex y el agente retardante pueden causar una reacción alérgica incluyendo choque anafiláctico.</li> </ul>

<b>Presentaciones Comerciales</b>	Caja por 3 condones (7703689627614) Caja por 6condones (7703689796099)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Producto no reutilizable.</b> Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ruptura del empaque, no use el producto. Vida útil: 5 años
<b>Fabricado por:</b>	Thai Nippon Rubber (TNR) industry public company limited, Tailandia
<b>Importado y distribuido por:</b>	<b>Asociación PROFAMILIA</b> Calle 34 No 14 -52 Bogotá – Colombia



**Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA**  
Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.  
Asociación Profamilia

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**  
**CONDON PIEL® EXCITANTE**

CONDONES MASCULINOS DE CAUCHO NATURAL DE LATEX

																																											
<b>Registro Sanitario</b>	<b>INVIMA 2022DM-0025043</b>																																										
<b>Clasificación Dispositivo</b>	<b>Clase IIb</b>																																										
<b>Usos</b>	<p><b>Método anticonceptivo de barrera:</b>          El uso de preservativos es altamente efectivo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. El condón Piel Excitante ha sido diseñado para aumentar el área de contacto mediante una textura rizada, mejorando la sensación táctil durante la relación sexual.</p>																																										
<b>Especificaciones de Producto</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th> <th>Especificación</th> <th>Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Natural</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Textura</td> <td>Rizada</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td>min. 180 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>52 ± 2 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td>Entre 400 y 700 mg</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>Detección de agujeros</td> <td>Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤ 25 mm a partir del extremo abierto del condón</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Presión de estallamiento</td> <td>min. 1,0 kPa</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Volumen de estallamiento</td> <td>min. 18 litros</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Hongos y levaduras</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesofilos</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>S. aureus</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>E. Coli</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>Pseudomonas</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Color	Natural	ISO 4074:2015	Textura	Rizada	ISO 4074:2015	Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015	Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015	Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno	Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤ 25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015	Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015	Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015	Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	Aerobios mesofilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente	<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente	<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente
Prueba	Especificación	Norma Técnica																																									
Color	Natural	ISO 4074:2015																																									
Textura	Rizada	ISO 4074:2015																																									
Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015																																									
Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015																																									
Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno																																									
Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤ 25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015																																									
Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015																																									
Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015																																									
Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																									
Aerobios mesofilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																									
<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente																																									
<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente																																									
<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente																																									
<b>Descripción del producto</b>	<p>Los condones PIEL® Excitante son condones masculinos de caucho natural de látex con texturas estimulantes, transparentes, de forma anatómica y con reservorio. ancho nominal 52 mm. Cada condón PIEL® es controlado electrónicamente y empaçado higiénicamente para cumplir con los estándares internacionales definidos en la norma ISO 4074 § 4-14 y fueron realizadas las pruebas de biocompatibilidad de acuerdo con la ISO 10993.</p>																																										

<p><b>Instrucciones de uso</b></p>	<p><b>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar Condones PIEL®</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique la fecha de vencimiento impresa en el foil y use el condón PIEL® únicamente si se encuentra vigente.</li> <li>2. Al momento de uso verifique la integridad del foil en el cual se encuentra empacado el Condón PIEL®. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado, si el foil se encuentra arrugado o si la burbuja de aire no es palpable.</li> <li>3. El foil debe abrirse con la yema de los dedos. No utilice elementos cortopunzantes (tijeras, bisturí, llaves, joyas, etc.) ni los dientes, ya que puede rasgar el látex del condón.</li> <li>4. Saque del empaque con cuidado el condón PIEL® y verifique que este esté listo para desenrollar. Absténgase de usar si el condón se percibe seco o quebradizo.</li> <li>5. Coloque el condón PIEL® sobre la cabeza del pene erecto tomándolo por el reservorio (punta). Desenrolle el condón PIEL® a lo largo del pene hasta llegar a la base del mismo. Verifique que no queden burbujas de aire entre el condón y el pene.</li> <li>6. El condón PIEL® está listo para su uso.</li> <li>7. Después de la eyaculación, retire el pene erecto de la vagina sosteniendo el condón PIEL® por el borde para evitar derrame de semen.</li> <li>8. Retire el condón PIEL® del pene y deseche en papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</li> </ol>
<p><b>Precauciones de Uso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto de uso único:</b> Use un condón PIEL® nuevo por cada contacto sexual. No lo use dos veces. Reutilizar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.</li> <li>• El uso de dos o más condones PIEL® simultáneamente no aumenta la seguridad de uso del condón y puede provocar fricciones que dañan el látex.</li> <li>• Si la persona que esté usando el preservativo nota que este se desprende o que le presiona de forma excesiva, debe entonces interrumpir de inmediato la penetración por riesgo de rotura del preservativo.</li> <li>• En caso de usar lubricantes íntimos, se debe garantizar que sea compatible con el látex del condón PIEL®</li> <li>• Las sustancias de aplicación tópica diferentes a lubricantes íntimos (medicamentos, lociones, cremas, jabones, vaselina, aceite de bebe, loción corporal, aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc.) puede afectar la integridad del condón PIEL®, por lo cual no se recomienda su uso simultaneo.</li> <li>• En caso de sospechar o detectar una falla, acuda a una IPS en las 72 horas posteriores a la relación sexual. Allí se le brindara atención médica a usted y su pareja.</li> <li>• En caso de estar recibiendo algún tipo de tratamiento de aplicación directa en el pene o en la vagina, ya sea con o sin receta médica, se recomienda consultar con su médico o farmacéutico.</li> <li>• El látex puede causar una reacción alérgica incluyendo choque anafiláctico.</li> </ul>

<b>Presentaciones Comerciales</b>	Caja por 3 condones (código de barras 7703689031190) Caja por 6 condones (código de barras 7703689011529)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Producto no reutilizable.</b> Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ruptura del empaque, no use el producto. Vida útil: 5 años
<b>Fabricado por:</b>	Thai Nippon Rubber (TNR) Industry public company limited, Tailandia
<b>Importado y distribuido por:</b>	<b>Asociación PROFAMILIA</b> Calle 34 No 14 -52 Bogotá – Colombia



**Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA**

Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.  
Asociación Profamilia

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO  
CONDON PIEL® RESISTENTE**

CONDONES MASCULINOS DE CAUCHO NATURAL DE LATEX



<b>Registro Sanitario</b>	<p align="center"><b>INVIMA 2022DM-0025043</b></p>																																													
<b>Clasificación Dispositivo</b>	<p align="center"><b>Clase IIb</b></p>																																													
<b>Usos</b>	<p><b>Método anticonceptivo de barrera:</b> El uso de preservativos es altamente efectivo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. El condón Piel Resistente presenta un grosor de pared mayor, lo cual brinda una resistencia extra en el condón, siendo útil para relaciones sexuales con baja lubricación y/o alta tracción mecánica sin afectar la sensibilidad.</p>																																													
<b>Especificaciones de Producto</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th> <th>Especificación</th> <th>Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Natural</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Textura</td> <td>Lisa</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td>min. 180 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>52 ± 2 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Grosor de pared</td> <td>Mínimo 0.09 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td>Entre 400 y 700 mg</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>Detección de agujeros</td> <td>Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Presión de estallamiento</td> <td>min. 1,0 kPa</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Volumen de estallamiento</td> <td>min. 18 litros</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Hongos y levaduras</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesófilos</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>S. aureus</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>E. Coli</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>Pseudomonas</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Color	Natural	ISO 4074:2015	Textura	Lisa	ISO 4074:2015	Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015	Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015	Grosor de pared	Mínimo 0.09 mm	ISO 4074:2015	Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno	Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015	Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015	Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015	Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	Aerobios mesófilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente	<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente	<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente
Prueba	Especificación	Norma Técnica																																												
Color	Natural	ISO 4074:2015																																												
Textura	Lisa	ISO 4074:2015																																												
Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015																																												
Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015																																												
Grosor de pared	Mínimo 0.09 mm	ISO 4074:2015																																												
Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno																																												
Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015																																												
Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015																																												
Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015																																												
Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																												
Aerobios mesófilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																												
<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<b>Descripción del producto</b>	<p>Los condones PIEL® Resistente son condones masculinos de caucho natural de latex con pared más gruesa y gran sensación, transparentes, de forma anatómica y con reservorio. ancho nominal 52 mm.</p> <p>Cada condón PIEL® es controlado electrónicamente y empacado higiénicamente para cumplir con los estándares internacionales definidos en la norma ISO 4074 § 4-14 y fueron realizadas las pruebas de biocompatibilidad de acuerdo con la ISO 10993.</p>																																													

<p><b>Instrucciones de uso</b></p>	<p><b>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar Condones PIEL®</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique la fecha de vencimiento impresa en el foil y use el condón PIEL® únicamente si se encuentra vigente.</li> <li>2. Al momento de uso verifique la integridad del foil en el cual se encuentra empacado el Condón PIEL®. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado, si el foil se encuentra arrugado o si la burbuja de aire no es palpable.</li> <li>3. El foil debe abrirse con la yema de los dedos. No utilice elementos cortopunzantes (tijeras, bisturí, llaves, joyas, etc.) ni los dientes, ya que puede rasgar el látex del condón.</li> <li>4. Saque del empaque con cuidado el condón PIEL® y verifique que este esté listo para desenrollar. Absténgase de usar si el condón se percibe seco o quebradizo.</li> <li>5. Coloque el condón PIEL® sobre la cabeza del pene erecto tomándolo por el reservorio (punta). Desenrolle el condón PIEL® a lo largo del pene hasta llegar a la base del mismo. Verifique que no queden burbujas de aire entre el condón y el pene.</li> <li>6. El condón PIEL® está listo para su uso.</li> <li>7. Después de la eyaculación, retire el pene erecto de la vagina sosteniendo el condón PIEL® por el borde para evitar derrame de semen.</li> <li>8. Retire el condón PIEL® del pene y deseche en papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</li> </ol>
<p><b>Precauciones de Uso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto de uso único:</b> Use un condón PIEL® nuevo por cada contacto sexual. No lo use dos veces. Reutilizar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.</li> <li>• El uso de dos o más condones PIEL® simultáneamente no aumenta la seguridad de uso del condón y puede provocar fricciones que dañan el látex.</li> <li>• Si la persona que esté usando el preservativo nota que este se desprende o que le presiona de forma excesiva, debe entonces interrumpir de inmediato la penetración por riesgo de rotura del preservativo.</li> <li>• En caso de usar lubricantes íntimos, se debe garantizar que sea compatible con el látex del condón PIEL®</li> <li>• Las sustancias de aplicación tópica diferentes a lubricantes íntimos (medicamentos, lociones, cremas, jabones, vaselina, aceite de bebe, loción corporal, aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc.) puede afectar la integridad del condón PIEL®, por lo cual no se recomienda su uso simultaneo.</li> <li>• En caso de sospechar o detectar una falla, acuda a una IPS en las 72 horas posteriores a la relación sexual. Allí se le brindara atención médica a usted y su pareja.</li> <li>• En caso de estar recibiendo algún tipo de tratamiento de aplicación directa en el pene o en la vagina, ya sea con o sin receta médica, se recomienda consultar con su médico o farmacéutico.</li> <li>• El látex puede causar una reacción alérgica incluyendo choque anafiláctico.</li> </ul>

<b>Presentaciones Comerciales</b>	Caja por 3 condones (código de barras 7703689031145) Caja por 6 condones (código de barras 7703689074333)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Producto no reutilizable.</b> Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ruptura del empaque, no use el producto. Vida útil: 5 años
<b>Fabricado por:</b>	Thai Nippon Rubber (TNR) industry public company limited, Tailandia
<b>Importado y distribuido por:</b>	<b>Asociación PROFAMILIA</b> Calle 34 No 14 -52 Bogotá – Colombia



**Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA**

Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.  
Asociación Profamilia


**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**  
**CONDON PIEL® SABORES**

CONDONES MASCULINOS DE CAUCHO NATURAL DE LATEX

																																											
<b>Registro Sanitario</b>	<b>INVIMA 2022DM-0025043</b>																																										
<b>Clasificación Dispositivo</b>	<b>Clase IIb</b>																																										
<b>Usos</b>	<p><b>Método anticonceptivo de barrera:</b>  El uso de preservativos es altamente efectivo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. La presentación Piel Sabores incluye 3 diferentes referencias de Condones Piel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piel Fresa: Condón de látex rojo lubricado con silicona y esencia de Fresa.</li> <li>- Piel Banano: condón de látex amarillo lubricado con silicona y esencia de Banano</li> <li>- Piel Tutti Frutti: Condón de látex azul lubricado con silicona y esencia de Tutti Fruti</li> </ul> <p>Piel Sabores permite explorar nuevas sensaciones e incluir otros sentidos en las relaciones sexuales.</p>																																										
<b>Especificaciones de Producto</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Prueba</th> <th style="text-align: center;">Especificación</th> <th style="text-align: center;">Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color/esencia</td> <td style="text-align: center;">Rojo/Fresa Amarillo/Banano Azul/Tutti Frutti</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Textura</td> <td style="text-align: center;">Liso</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td style="text-align: center;">min. 180 mm</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td style="text-align: center;">52 ± 2 mm</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td style="text-align: center;">Entre 400 y 700 mg</td> <td style="text-align: center;">Interno</td> </tr> <tr> <td>Detección de agujeros</td> <td>Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤ 25 mm a partir del extremo abierto del condón</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Presión de estallamiento</td> <td style="text-align: center;">min. 1,0 kPa</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Volumen de estallamiento</td> <td style="text-align: center;">min. 18 litros</td> <td style="text-align: center;">ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Hongos y levaduras</td> <td style="text-align: center;">Max. 10 UFC/g</td> <td style="text-align: center;">USP Vigente</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesófilos</td> <td style="text-align: center;">Max. 10 UFC/g</td> <td style="text-align: center;">USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>S. aureus</i></td> <td style="text-align: center;">Ausente</td> <td style="text-align: center;">USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>E. Coli</i></td> <td style="text-align: center;">Ausente</td> <td style="text-align: center;">USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>Pseudomonas</i></td> <td style="text-align: center;">Ausente</td> <td style="text-align: center;">USP Vigente</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Color/esencia	Rojo/Fresa Amarillo/Banano Azul/Tutti Frutti	ISO 4074:2015	Textura	Liso	ISO 4074:2015	Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015	Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015	Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno	Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤ 25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015	Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015	Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015	Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	Aerobios mesófilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente	<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente	<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente
Prueba	Especificación	Norma Técnica																																									
Color/esencia	Rojo/Fresa Amarillo/Banano Azul/Tutti Frutti	ISO 4074:2015																																									
Textura	Liso	ISO 4074:2015																																									
Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015																																									
Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015																																									
Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno																																									
Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤ 25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015																																									
Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015																																									
Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015																																									
Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																									
Aerobios mesófilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																									
<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente																																									
<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente																																									
<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente																																									

<p><b>Descripción del producto</b></p>	<p>La presentación Condones PIEL® Sabores consta de condones masculinos de caucho natural de latex, de forma anatómica y con reservorio. ancho nominal 52 mm. Consta de 3 referencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piel Fresa: Condón de látex rojo lubricado con silicona y esencia de Fresa.</li> <li>- Piel Banano: condón de látex amarillo lubricado con silicona y esencia de Banano</li> <li>- Piel Tutti Frutti: Condón de látex azul lubricado con silicona y esencia de Tutti Fruti</li> </ul> <p>Cada condón PIEL® es controlado electrónicamente y empacado higiénicamente para cumplir con los estándares internacionales definidos en la norma ISO 4074 § 4-14 y fueron realizadas las pruebas de biocompatibilidad de acuerdo con la ISO 10993.</p>
<p><b>Instrucciones de uso</b></p>	<p><b>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar Condones PIEL®</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique la fecha de vencimiento impresa en el foil y use el condón PIEL® únicamente si se encuentra vigente.</li> <li>2. Al momento de uso verifique la integridad del foil en el cual se encuentra empacado el Condón PIEL®. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado, si el foil se encuentra arrugado o si la burbuja de aire no es palpable.</li> <li>3. El foil debe abrirse con la yema de los dedos. No utilice elementos cortopunzantes (tijeras, bisturí, llaves, joyas, etc.) ni los dientes, ya que puede rasgar el látex del condón.</li> <li>4. Saque del empaque con cuidado el condón PIEL® y verifique que este esté listo para desenrollar. Absténgase de usar si el condón se percibe seco o quebradizo.</li> <li>5. Coloque el condón PIEL® sobre la cabeza del pene erecto tomándolo por el reservorio (punta). Desenrolle el condón PIEL® a lo largo del pene hasta llegar a la base del mismo. Verifique que no queden burbujas de aire entre el condón y el pene.</li> <li>6. El condón PIEL® está listo para su uso.</li> <li>7. Después de la eyaculación, retire el pene erecto de la vagina sosteniendo el condón PIEL® por el borde para evitar derrame de semen.</li> <li>8. Retire el condón PIEL® del pene y deseche en papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</li> </ol>

<p><b>Precauciones de Uso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto de uso único:</b> Use un condón PIEL® nuevo por cada contacto sexual. No lo use dos veces. Reutilizar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.</li> <li>• El uso de dos o más condones PIEL® simultáneamente no aumenta la seguridad de uso del condón y puede provocar fricciones que dañan el látex.</li> <li>• Si la persona que esté usando el preservativo nota que este se desprende o que le presiona de forma excesiva, debe entonces interrumpir de inmediato la penetración por riesgo de rotura del preservativo.</li> <li>• En caso de usar lubricantes íntimos, se debe garantizar que sea compatible con el látex del condón PIEL®</li> <li>• Las sustancias de aplicación tópica diferentes a lubricantes íntimos (medicamentos, lociones, cremas, jabones, vaselina, aceite de bebe, loción corporal, aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc.) puede afectar la integridad del condón PIEL®, por lo cual no se recomienda su uso simultaneo.</li> <li>• En caso de sospechar o detectar una falla, acuda a una IPS en las 72 horas posteriores a la relación sexual. Allí se le brindara atención médica a usted y su pareja.</li> <li>• En caso de estar recibiendo algún tipo de tratamiento de aplicación directa en el pene o en la vagina, ya sea con o sin receta médica, se recomienda consultar con su médico o farmacéutico.</li> <li>• El látex y el lubricante pueden causar una reacción alérgica incluyendo choque anafiláctico.</li> </ul>
<p><b>Presentaciones Comerciales</b></p>	<p>Caja por 3 condones (1 Fresa, 1 Tutti Frutti, 1 Banano): código de barras 7703689031176  Caja por 6 condones (2 Fresa, 2 Tutti Frutti, 2 Banano): código de barras 7703689188764</p>
<p><b>Condiciones de almacenamiento</b></p>	<p><b>Producto no reutilizable.</b>  Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C.  Manténgase fuera del alcance de los niños.  En caso de ruptura del empaque, no use el producto.  Vida útil: 5 años</p>
<p><b>Fabricado por:</b></p>	<p>Thai Nippon Rubber (TNR)  industry public company limited,  Tailandia</p>
<p><b>Importado y distribuido por:</b></p>	<p><b>Asociación PROFAMILIA</b>  Calle 34 No 14 -52  Bogotá – Colombia</p>

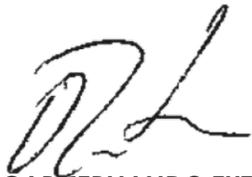

**Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA**  
Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.  
Asociación Profamilia

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO**  
**CONDON PIEL® SENSITIVO**

CONDONES MASCULINOS DE CAUCHO NATURAL DE LATEX

																																														
<b>Registro Sanitario</b>	<b>INVIMA 2022DM-0025043</b>																																													
<b>Clasificación Dispositivo</b>	<b>Clase IIb</b>																																													
<b>Usos</b>	<p><b>Método anticonceptivo de barrera:</b>          El uso de preservativos es altamente efectivo en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. El condón Piel Sensitive presenta un grosor de pared menor, lo cual brinda una sensación más cercana a la natural sin comprometer la seguridad durante el uso del preservativo.</p>																																													
<b>Especificaciones de Producto</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Prueba</th> <th style="width: 33%;">Especificación</th> <th style="width: 33%;">Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Natural</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Textura</td> <td>Liso</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Largo</td> <td>min. 180 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>52 ± 2 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Grosor de pared</td> <td>Entre 0,050 y 0,065 mm</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td>Entre 400 y 700 mg</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>Detección de agujeros</td> <td>Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Presión de estallamiento</td> <td>min. 1,0 kPa</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Volumen de estallamiento</td> <td>min. 18 litros</td> <td>ISO 4074:2015</td> </tr> <tr> <td>Hongos y levaduras</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesofilos</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>S. aureus</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>E. Coli</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> <tr> <td><i>Pseudomonas</i></td> <td>Ausente</td> <td>USP Vigente</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Color	Natural	ISO 4074:2015	Textura	Liso	ISO 4074:2015	Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015	Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015	Grosor de pared	Entre 0,050 y 0,065 mm	ISO 4074:2015	Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno	Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015	Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015	Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015	Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	Aerobios mesofilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente	<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente	<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente	<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente
Prueba	Especificación	Norma Técnica																																												
Color	Natural	ISO 4074:2015																																												
Textura	Liso	ISO 4074:2015																																												
Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015																																												
Ancho	52 ± 2 mm	ISO 4074:2015																																												
Grosor de pared	Entre 0,050 y 0,065 mm	ISO 4074:2015																																												
Cantidad de lubricante	Entre 400 y 700 mg	Interno																																												
Detección de agujeros	Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015																																												
Presión de estallamiento	min. 1,0 kPa	ISO 4074:2015																																												
Volumen de estallamiento	min. 18 litros	ISO 4074:2015																																												
Hongos y levaduras	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																												
Aerobios mesofilos	Max. 10 UFC/g	USP Vigente																																												
<i>S. aureus</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<i>E. Coli</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<i>Pseudomonas</i>	Ausente	USP Vigente																																												
<b>Descripción del producto</b>	<p>Los condones PIEL® Sensitive son condones masculinos de caucho natural de látex que brindan un placer cercano a lo natural, transparentes, de forma anatómica y con reservorio. ancho nominal 52 mm.</p> <p>Cada condón PIEL® es controlado electrónicamente y empaçado higiénicamente para cumplir con los estándares internacionales definidos en la norma ISO 4074 § 4-14 y fueron realizadas las pruebas de biocompatibilidad de acuerdo con la ISO 10993.</p>																																													

<p><b>Instrucciones de uso</b></p>	<p><b>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar Condones PIEL®</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique la fecha de vencimiento impresa en el foil y use el condón PIEL® únicamente si se encuentra vigente.</li> <li>2. Al momento de uso verifique la integridad del foil en el cual se encuentra empacado el Condón PIEL®. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado, si el foil se encuentra arrugado o si la burbuja de aire no es palpable.</li> <li>3. El foil debe abrirse con la yema de los dedos. No utilice elementos cortopunzantes (tijeras, bisturí, llaves, joyas, etc.) ni los dientes, ya que puede rasgar el látex del condón.</li> <li>4. Saque del empaque con cuidado el condón PIEL® y verifique que este esté listo para desenrollar. Absténgase de usar si el condón se percibe seco o quebradizo.</li> <li>5. Coloque el condón PIEL® sobre la cabeza del pene erecto tomándolo por el reservorio (punta). Desenrolle el condón PIEL® a lo largo del pene hasta llegar a la base del mismo. Verifique que no queden burbujas de aire entre el condón y el pene.</li> <li>6. El condón PIEL® está listo para su uso.</li> <li>7. Después de la eyaculación, retire el pene erecto de la vagina sosteniendo el condón PIEL® por el borde para evitar derrame de semen.</li> <li>8. Retire el condón PIEL® del pene y deseche en papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</li> </ol>
<p><b>Precauciones de Uso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Producto de uso único:</b> Use un condón PIEL® nuevo por cada contacto sexual. No lo use dos veces. Reutilizar un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.</li> <li>• El uso de dos o más condones PIEL® simultáneamente no aumenta la seguridad de uso del condón y puede provocar fricciones que dañan el látex.</li> <li>• Si la persona que esté usando el preservativo nota que este se desprende o que le presiona de forma excesiva, debe entonces interrumpir de inmediato la penetración por riesgo de rotura del preservativo.</li> <li>• En caso de usar lubricantes íntimos, se debe garantizar que sea compatible con el látex del condón PIEL®</li> <li>• Las sustancias de aplicación tópica diferentes a lubricantes íntimos (medicamentos, lociones, cremas, jabones, vaselina, aceite de bebe, loción corporal, aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc.) puede afectar la integridad del condón PIEL®, por lo cual no se recomienda su uso simultaneo.</li> <li>• En caso de sospechar o detectar una falla, acuda a una IPS en las 72 horas posteriores a la relación sexual. Allí se le brindara atención médica a usted y su pareja.</li> <li>• En caso de estar recibiendo algún tipo de tratamiento de aplicación directa en el pene o en la vagina, ya sea con o sin receta médica, se recomienda consultar con su médico o farmacéutico.</li> <li>• El látex puede causar una reacción alérgica incluyendo choque anafiláctico.</li> </ul>
<p><b>Presentaciones Comerciales</b></p>	<p>Caja por 3 condones (código de barras 7703689031169) Caja por 6 condones (código de barras 7703689981860)</p>

<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Producto no reutilizable.</b> Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ruptura del empaque, no use el producto. Vida útil: 5 años
<b>Fabricado por:</b>	Thai Nippon Rubber (TNR) industry public company limited, Tailandia
<b>Importado y distribuido por:</b>	<b>Asociación PROFAMILIA</b> Calle 34 No 14 -52 Bogotá – Colombia



**Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA**

Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.  
Asociación Profamilia