

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO
GEL LUBRICANTE PIEL® NEUTRO**



Registro Sanitario	INVIMA 2023DM-0026925																											
Clasificación Dispositivo	Clase I																											
Uso	<p>Lubricante Intimo de base acuosa: Reduce la fricción de las partes íntimas en contacto durante la relación sexual. Compatible con condones de látex. La referencia PIEL Neutro no presenta olor ni sabor apreciables, permitiendo experimentar sin límites con sensación natural.</p>																											
Descripción del producto	<p>GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO facilita la penetración en aquellos casos que la lubricación natural sea deficiente (resequedad vaginal, masturbación), no haya lubricación (sexo anal, uso de juguetes sexuales) o se desee reducir el dolor (penetración fuerte, contracción vaginal) durante relaciones sexuales.</p>																											
Especificaciones de Producto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th> <th>Especificación</th> <th>Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apariencia</td> <td>Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Gravedad específica</td> <td>1,055 – 1,085 g/mL</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Viscosidad a 25°C</td> <td>8.000 – 20.000 cps</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Osmolaridad</td> <td>Menor a 1200 mOsm/kg</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Compatibilidad</td> <td>Compatible con condones de látex masculinos y femeninos</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesofilos</td> <td>Max. 10² UFC/g</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Mohos y levaduras</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td>Sachet: 4,5 mL</td> <td>Interno</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Apariencia	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Gravedad específica	1,055 – 1,085 g/mL	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Viscosidad a 25°C	8.000 – 20.000 cps	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Osmolaridad	Menor a 1200 mOsm/kg	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Compatibilidad	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Aerobios mesofilos	Max. 10 ² UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Mohos y levaduras	Max. 10 UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Cantidad de lubricante	Sachet: 4,5 mL	Interno
Prueba	Especificación	Norma Técnica																										
Apariencia	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Gravedad específica	1,055 – 1,085 g/mL	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Viscosidad a 25°C	8.000 – 20.000 cps	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Osmolaridad	Menor a 1200 mOsm/kg	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Compatibilidad	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Aerobios mesofilos	Max. 10 ² UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Mohos y levaduras	Max. 10 UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Cantidad de lubricante	Sachet: 4,5 mL	Interno																										
Instrucciones de uso	<p>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Al momento de uso verifique la fecha de vencimiento y use Gel lubricante PIEL neutro únicamente si se encuentra vigente. 2- Verifique la integridad del sachet en el cual se encuentra empacado Gel lubricante PIEL neutro. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado. 3- Abra el sachet y aplique abundante Gel lubricante PIEL neutro en la parte que desee lubricar (vagina, pene erecto, ano, dedos, juguetes sexuales, etc.). 																											

	<p>4- Gel lubricante PIEL neutro está listo para cumplir su función durante la relación sexual</p> <p>5- Después de la experiencia con Gel lubricante PIEL neutro deseche el empaque en la papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</p> <p>6- Gel lubricante PIEL neutro es soluble en agua, lo cual implica que el aseo rutinario es suficiente para remover del cuerpo.</p>
Precauciones de Uso	<ul style="list-style-type: none"> - Gel lubricante PIEL neutro no es un anticonceptivo ni contiene agentes espermicidas. - Gel lubricante PIEL neutro en presentación sachet es de uso único. - Los condones de látex son compatibles con Gel lubricante PIEL neutro. - Gel lubricante PIEL neutro puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico, en personas sensibles a sus componentes.
Presentaciones Comerciales	<p>Caja con 6 sachets. (Código de barras: 7703689814205)</p> <p>Caja dispensadora con 30 sachets (Código de barras: 7703689275884)</p>
Condiciones de almacenamiento	<p>Producto no reutilizable.</p> <p>Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>En caso de ruptura del empaque, no use el producto.</p> <p>Vida útil: 3 años</p>
Fabricado por:	<p>Thai Nippon Rubber (TNR)</p> <p>Industry Public Company Limited, Tailandia</p>
Importado y distribuido por:	<p>Asociación PROFAMILIA</p> <p>Bogotá D.C., Colombia</p>



Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA
 Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.
 Asociación Profamilia

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO
GEL LUBRICANTE PIEL® DURAZNO**



Registro Sanitario	INVIMA 2023DM-0026925																											
Clasificación Dispositivo	Clase I																											
Uso	Lubricante Intimo de base acuosa: Reduce la fricción de las partes íntimas en contacto durante la relación sexual. Compatible con condones de látex. La referencia PIEL Durazno no presenta olor característico permitiendo estimular otros sentidos para disfrutar el momento																											
Descripción del producto	Gel lubricante PIEL facilita la penetración en aquellos casos que la lubricación natural sea deficiente (resequedad vaginal, masturbación), no haya lubricación (sexo anal, uso de juguetes sexuales) o se desee reducir el dolor (penetración fuerte, contracción vaginal) durante relaciones sexuales.																											
Especificaciones de Producto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th> <th>Especificación</th> <th>Norma Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apariencia</td> <td>Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas con olor característico a durazno</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Gravedad específica</td> <td>1,055 – 1,085 g/mL</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Viscosidad a 25°C</td> <td>8.000 – 20.000 cps</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Osmolaridad</td> <td>Menor a 1200 mOsm/kg</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Compatibilidad</td> <td>Compatible con condones de látex masculinos y femeninos</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Aerobios mesofilos</td> <td>Max. 10² UFC/g</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Mohos y levaduras</td> <td>Max. 10 UFC/g</td> <td>UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022</td> </tr> <tr> <td>Cantidad de lubricante</td> <td>Tubo: 30 mL</td> <td>Interno</td> </tr> </tbody> </table>	Prueba	Especificación	Norma Técnica	Apariencia	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas con olor característico a durazno	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Gravedad específica	1,055 – 1,085 g/mL	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Viscosidad a 25°C	8.000 – 20.000 cps	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Osmolaridad	Menor a 1200 mOsm/kg	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Compatibilidad	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Aerobios mesofilos	Max. 10 ² UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Mohos y levaduras	Max. 10 UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022	Cantidad de lubricante	Tubo: 30 mL	Interno
Prueba	Especificación	Norma Técnica																										
Apariencia	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas con olor característico a durazno	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Gravedad específica	1,055 – 1,085 g/mL	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Viscosidad a 25°C	8.000 – 20.000 cps	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Osmolaridad	Menor a 1200 mOsm/kg	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Compatibilidad	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Aerobios mesofilos	Max. 10 ² UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Mohos y levaduras	Max. 10 UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF May 2022																										
Cantidad de lubricante	Tubo: 30 mL	Interno																										
Instrucciones de uso	<p>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar GEL LUBRICANTE PIEL DURAZNO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Al momento de uso verifique la fecha de vencimiento y use Gel lubricante PIEL únicamente si se encuentra vigente. 2- Verifique la integridad del tubo en el cual se encuentra empacado Gel lubricante PIEL. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado. 3- Abra el tubo y aplique abundante Gel lubricante PIEL en la parte que desee lubricar (vagina, pene erecto, ano, dedos, juguetes sexuales, etc.). 4- Gel lubricante PIEL está listo para cumplir su función durante la relación 																											

	sexual. 5- Gel lubricante PIEL es soluble en agua, lo cual implica que el aseo rutinario es suficiente para remover del cuerpo.
Precauciones de Uso	<ul style="list-style-type: none"> - Gel lubricante PIEL no es un anticonceptivo ni contiene agentes espermicidas. - Gel lubricante PIEL en presentación tubo puede ser empleado hasta 3 meses después de su apertura. - Los condones de látex son compatibles con Gel lubricante PIEL. - Gel lubricante PIEL puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico, en personas sensibles a sus componentes.
Presentaciones Comerciales	Tubo por 30 mL. (Código de barras: 7703689561451)
Condiciones de almacenamiento	<p>Almacéñese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>En caso de ruptura del empaque, no use el producto.</p> <p>Una vez abierto, consuma el contenido del tubo en los 3 meses siguientes.</p> <p>Pasado este tiempo desheche el lubricante no empleado.</p> <p>Vida útil: 3 años</p>
Fabricado por:	Thai Nippon Rubber (TNR) Industry Public Company Limited, Tailandia
Importado y distribuido por:	Asociación PROFAMILIA Bogotá D.C., Colombia



Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA
Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.
Asociación Profamilia